

# LAMPE UV LED

MODE D'EMPLOI · MÉTHODE D'INSTALLATION · ENTRETIEN

## 1. Modes de fonctionnement

Cet appareil peut être réglé sur différents modes de fonctionnement par l'utilisateur. Le temps de fonctionnement (1 à 40 secondes) est ajustable.

## 2. Réglage du temps

En mode veille, maintenir enfoncée la touche **MENU** environ 5 secondes jusqu'à entendre un « bip », puis relâcher. Appuyer brièvement sur la touche **POWER** pour ajuster le temps par incréments de 5 secondes. Après avoir réglé le temps souhaité, attendre 5 secondes sans aucune action ; un second « bip » indiquera que le réglage est terminé.

*(En mode A\_I, vous pouvez également régler 1 seconde ou 3 secondes.)*

## 3. Changement de mode de fonctionnement

En mode veille, appuyer brièvement sur la touche **MENU** pour passer au mode suivant. Chaque appui bref bascule sur le mode de fonctionnement suivant. Après avoir sélectionné le mode souhaité, le réglage est conservé et l'utilisation peut démarrer directement.

### 4 modes de fonctionnement disponibles :

1. **Mode Fort** — la lampe émet à pleine puissance
2. **Mode Flash** — la lampe fonctionne en clignotement
3. **Mode Progressif** — la lampe passe progressivement du faible au fort
4. **Mode A\_I** — la puissance bleue de la lampe peut être réglée sur 18 niveaux d'intensité

En mode de fonctionnement, appuyer brièvement deux fois sur la touche **MENU** pour régler les 18 niveaux d'intensité (L1–L9, H1–H9).

## Contenu de l'emballage

ÉLÉMENT	QUANTITÉ
Unité lampe LED à polymériser	1 set
Guide de lumière	1 pièce
Câble de chargement	1 pièce
Feuille de protection lumière	1 pièce
Manuel d'utilisation	1 exemplaire
Socle	1 set

## Méthode d'installation

1. **Installation du guide de lumière** : aligner le guide avec le trou rond situé en haut de l'appareil et l'enfoncer vers l'intérieur, avec une légère rotation. Quand le guide est en bonne position, un léger « clic » se fait entendre.
2. **Installation de la feuille de protection lumière** : pousser la feuille de protection à l'avant du guide de lumière.
3. **Branchement de l'adaptateur d'alimentation** : brancher le câble de charge, brancher l'adaptateur dans une prise 100–240 V, puis insérer l'autre extrémité dans le port de charge à l'arrière de l'unité principale.

## Entretien quotidien

1. Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. La machine doit être renvoyée en usine pour toute réparation.
2. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine. Contactez votre revendeur local ou notre société pour toute pièce de rechange. L'utilisation d'accessoires non d'origine est interdite et peut endommager la lampe.
3. Pour le nettoyage ou la désinfection, essuyer la surface avec de l'eau propre ou un désinfectant. **Ne pas faire tremper l'appareil** et ne pas exposer le corps de la machine à des températures élevées.
4. Après chaque utilisation, vérifier la présence éventuelle de résidus de résine sur la surface avant ou sur la jonction avant, afin de préserver la durée de vie et l'efficacité de polymérisation.

## Précautions

1. Ne jamais mettre la machine en marche pendant la charge.
2. L'intervalle entre deux utilisations continues doit être supérieur à **60 secondes**.
3. En usage clinique, la source lumineuse ne doit pas irradier directement la résine durcie pendant plus de 60 secondes, afin de ne pas altérer l'effet de polymérisation.
4. Le guide de lumière d'origine est fourni par le fabricant pour empêcher la lumière néfaste de blesser les yeux. La lumière bleue est strictement interdite d'irradier directement les yeux.
5. Si le guide de lumière présente des dommages visibles ou des fissures, le remplacer par un neuf.
6. La désinfection du guide de lumière s'effectue par essuyage de surface avec de l'eau propre ou un désinfectant ; il ne doit pas être désinfecté à haute température.
7. Veiller à ce que les électrodes aux deux extrémités de la batterie ne touchent pas de pièces métalliques, pour éviter tout court-circuit qui endommagerait la batterie.
8. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge. Tout autre chargeur peut endommager la batterie au lithium et le circuit de contrôle.
9. Après la charge, débrancher le chargeur de la prise de courant.
10. Il est strictement interdit de démonter la batterie sans autorisation.
11. Ne pas utiliser dans un environnement contenant des anesthésiques inflammables mélangés à l'air ou de l'oxyde nitreux.

**⚠ AVERTISSEMENT** — Ne pas pointer la source de lumière vers les yeux pendant l'utilisation. En cas d'accident, **se rendre immédiatement à l'hôpital pour un traitement médical.**

## Batteries et consommables — hors garantie

En cas d'apparition des conditions suivantes, les éventuelles réparations seront facturées :

- Dommages causés par un montage par l'utilisateur lui-même.
- Dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien ou de stockage de l'appareil.
- Dommages causés par l'auto-démontage de l'appareil par l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non d'origine.
- Paramètres de performance modifiés par rapport à la configuration d'origine.
- Absence de preuve d'achat, ou commande différente de l'achat initial, ou altération de la garantie.
- Dommages causés par cas de force majeure.
- Expiration de la période de réparation gratuite.

Si ce produit ne peut pas fonctionner correctement en raison de problèmes de qualité dans **un délai d'un an à compter de la date de vente**, notre usine prend en charge la réparation gratuite.

## Carte de garantie

NOM DE L'ARTICLE	N° D'ARTICLE
N° DE SÉRIE	DATE D'ACHAT
NOM DE L'UTILISATEUR	CONTACT
NOM DE LA SOCIÉTÉ	
ADRESSE	
REMARQUE	